

STEP	試薬名	処理時間	延長	撹拌
1	開始槽			
2	キシレン	5分	∞	ON
3	キシレン	4分	∞	ON
4	キシレン	3分	∞	ON
5	100%アルコール	1分	∞	ON
6	100%アルコール	1分	∞	ON
7	95%アルコール	1分	∞	ON
8	水洗槽	1分	∞	ON
9	2倍カツツィハマトキシリン	10分	=	ON
10	水洗槽	30秒	20%	ON
11	0.1%塩酸70%アルコール	10秒	=	ON
12	水洗槽	5分	20%	EW
13	エオジン	3分	=	ON
14	蒸留水	10秒	=	ON
15	100%アルコール	10秒	=	ON
16	100%アルコール	10秒	=	ON
17	100%アルコール	1分	20%	ON
18	100%アルコール	1分	20%	ON
19	100%アルコール	1分	20%	ON
20	キシレン	1分	∞	ON
21	キシレン	1分	∞	ON
22	キシレン	1分	∞	ON
23	終了槽 (キシレン)			

∞：処理時間の無限時間延長可、=：延長不可、20%：処理時間に対し20%の延長可  
EW：置換促進