


薬液交換

パラフィン溶融待機時間

パラフィンオープンの 制御温度に対して	待機時間
10℃以内の低下	0分
12℃までの低下	1時間
14℃までの低下	3時間30分
16℃までの低下	6時間
18℃までの低下	7時間
19℃までの低下	24時間

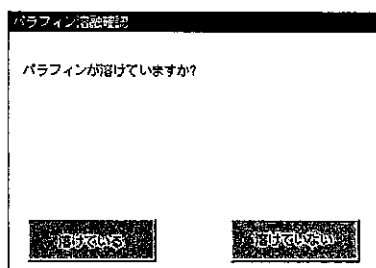

パラフィン溶融待機

パラフィン溶融待機とは、パラフィンが溶けるまで待つ時間であり、この間はパラフィンに関する操作は行えません。

パラフィン溶融待機の時間は、パラフィンが溶けるように十分な時間が設定されています。

メモ 初期概要モニターのパラフィン槽にパラフィン溶融待機（溶融中）を示す小アイコンが表示されます。

初期概要モニターのパラフィン槽を押すと、溶融予定時刻が確認できます。

停電等によりオープンの温度が低下した場合も、パラフィン溶融待機となります。

パラフィン溶融待機の解除


パラフィン溶融待機の時に、オープンの温度が設定温度に達している場合、以下の方法でパラフィン溶融待機の解除が行えます。

1. オープン扉を開き、パラフィンタンク内のパラフィンが全て溶けていることを目視確認します。
2. オープン扉を閉めると、パラフィン溶融確認画面が表示されます。パラフィンが溶けている場合は「溶けている」ボタンを押してください。溶けていない場合は「溶けていない」ボタンを押してください（パラフィン溶融待機が継続されます）。

メモ 初期概要モニターのパラフィン槽にパラフィン溶融待機（溶融中）を示す小アイコンの表示が消えます。

注意 パラフィンが溶けていることを目視確認せずパラフィン溶融待機の解除を行うと、エラーの原因となります。

警告 パラフィンオープンおよびパラフィンは高温になっている場合がありますので、火傷に注意してください。

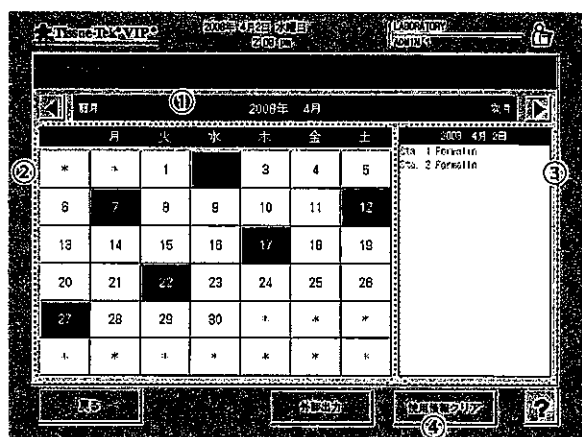

薬液交換カレンダー

薬液の管理方式を「日数管理」にしている場合、薬液交換の予定日をカレンダー上に表示することができます。

①ページ切り替えボタン

◀を押すと前月へ、▶を押すと次月へ移動できます。

メモ 次月ボタンを押して表示できる月は、12ヶ月目までです。
前月ボタンを押して表示できる月は、3ヶ月前までです。

②日付表示

表示されている月の日付が表示され、今日の日付は赤い文字で表示されます。

緑色で表示されている日は薬液交換予定日です。

オレンジ色で表示されている日は薬液交換実施日です。

色が付いている日を押すと、薬液交換槽の表示欄に詳細が表示されます。

③薬液交換槽の表示欄

選択された日に予定されている薬液交換の一覧が表示されます。

④使用情報クリアボタン

ボタンを押すと第4章9)の「使用情報クリア」画面へ行きます。

⑤外部出力ボタン

外部出力画面が表示され、薬液交換結果等が外部出力できます。