

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Käytettäväksi tuotteen Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers kanssa 24×50 mm

REF 6416

【Käyttötarkoitus】

Tuote asetetaan formaliinilla kiinnitetyn, parafiiniin valetun (FFPE) näytteen tai sytopatologisen näytteen sisältävän objektilasin päälle. Tuotteen tarkoituksena on suojata näytettä mekaanisilta voimilta ja ympäristöaltistukselta sekä mahdollistaa näytteen tutkiminen valomikroskoopilla. Tuotteen käytön yhteydessä käytetään näytteen päälle lisättävää peitinainetta, jonka avulla peitinlasi voidaan kiinnittää objektilasiin.

【Suunniteltu käyttäjä】

Henkilö, joka työskentelee patologian, anatomian tai kliinisen sytologian alalla, jolla on perustiedot omalta alaltaan (esim. patologi, laboratorioteknikko) ja joka vastaa mikroskooppien objektilasien valmistelusta.

【Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta tuotteen mukana】

Mikroskoopin objektilasit, peitinaine

【Käyttöohje】

- Poista pidikkeen muovisuojus.
- Poista vaahtomuovi.
- Aseta pidike peitinlasien lataussijaintiin.
- Liu'uta lovi asianmukaiseen uraan.
- Varmista, että pidike on tasaisesti paikallaan peitinlasien latauspaikassa.

【Käyttöä koskevat varoimet】

- Käytä suojakäsineitä välttääksesi lasin reunojen aiheuttamat haavat.
- Jos lasien rikkoutumisen tai hävittämisen yhteydessä syntyy pölyä tai pirstaleita, käytä (viranomaisten hyväksymää) pölytiivistä kasvosuojusta, suojalaseja ja suojakäsineitä.
- Vältä koskettamasta laseja märillä käsillä, sillä se aiheuttaa lasien tarttumisen kiinni toisiinsa.
- Älä päästä pidikettä kosketuksiin orgaanisten liuottimien kanssa, sillä ne aiheuttavat pidikkeen sulamista.
- Katso lasin asennusta koskevia tietoja tämän tuotteen kanssa käytettävän laitteen käyttöohjeesta.

【Turvallisuustoimenpiteet】

- Silmäkosketus: Jos pölyä joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi juoksevalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

- Ihokosketus: Pyyhi tuote varovasti pois iholta ihoa vaurioittamatta. Ota yhteys lääkäriin, jos ihovaurioita tai ihottumaa ilmenee.
- Nieleminen: Poista tuotteen jäämät suusta ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Hengittäminen: Jos pölyä on hengitetty, kurlaa. Ota yhteys lääkäriin, jos nenässä tai kurkussa esiintyy jatkuvaa kutinaa, kipua tai epämukavuuden tunnetta.

【Käyttö- ja säilytysolosuhteet】

- Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa ja paikoissa, joissa on korkea lämpötila / korkea ilmankosteus. Säilytettävä sisätiloissa paikassa, jossa on riittävä luonnollinen ilmanvaihto.
- Mikäli laitteeseen asetettu pidike poistetaan laitteesta, alkuperäinen suojus on asetettava paikalleen pidikkeeseen sen säilytystä varten.

【Viimeinen käyttöpäivä】

- Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen.

【Hävittäminen】

- Ulkoista hävitys jätteyhtiölle tai hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

【Varoimet】

Alla näytetty kuvamerkki koskee lasipölyn yhteydessä esiintyvää piidioksidipölyä.



- Saattaa aiheuttaa syöpää.
- Suurina määrinä esiintyvän hienojakoisen pölyn pitkään jatkuvasta hengittämisestä voi seurata hengityselin- tai munuaisvaurioita.

【Tekniset tiedot】

200 kpl/pidike; 5 kpl/pakkaus

【Huomaus】

Laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuote on kertakäyttöinen, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Valmistettu Japanissa	



Käy verkkosivustollamme

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

