

Tissue-Tek® Eosin

Prisma (Plus) standardlahuse mahutile

Kasutusjuhend

REF 9134-E

Sihotstarve

Toode on ette nähtud tsütöplasma värvimiseks formaliinis fikseeritud ja parafiinis sulundatud (FFPE) proovides või tsütöpatoloogilistes proovides. Seda kasutatakse tavaliselt koos Hematoxylin 3G-ga (tuuma värvimine) ja see võimaldab valgusmikroskoobiga vaadelda rakkude morfoloogilisi ning struktuurseid omadusi värvitud proovides.

Ettenähtud kasutaja

Ettenähtud kasutaja töötab patoloogia, anatoomia või kliinilise tsütöloogia erialal ja omab erialaseid baasteadmisi (nt patoloog, meditsiinilaborant) ning vastutab vaatluspreparaatide ettevalmistamise eest.

Analüüsi põhimõte

Tsütöplasma (enamik rakuorganelle) ja rakuvaheaine värvitakse eosiiniga punaseks/roosaks.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Kogu valmistatud värvilahus tuleks panna standardlahuse mahutisse.
- Kui värvikvaliteet halveneb või lahusekogus väheneb, vahetage kasutusel olev värvilahus värskest valmistatu vastu.
- Kui teil on küsimusi või vajate eosiini kasutamisel abi, võtke ühendust Sakura edasimüüja või esindajaga.

Vajalikud materjalid, mis ei kuulu komplekti

Mikroskoobi alusklaasid, ksüleen, etanool, hematoksyliin

Ohutusmeetmed

- Enne kasutamist kontrollida ohutuskardilt (SDS) toote ohu- ja toksilisuse teavet.
- Toodet käsitsedes tuleb kanda asjakohaseid kaitsevahendeid/silmakaitsemeid/näokaitset.
- Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
- Tagada piisav ventilatsioon.
- Pärast käsitlemist pesta hoolikalt käsi.
- Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada süsinikdioksiidi (CO₂), alkoholikindlat vahetu, kuivkemikaali või veeudu.

Esmaabimeetmed

- Silma sattumise korral loputada silma kohe vähemalt 15 minutit jooksva kraanivee all. Pöörduda arsti poole.
- Nahale sattumise korral eemaldada kohe saastunud riided ja jalanõud ning pesta kokkupuutunud piirkonda rohke veega.
- Sissehingamise korral katta ohver kohe tekiga, viia värske õhu kätte ja lasta vaikselt olla. Lasta ohvri nina nuusata ja kuristada. Vajaduse korral pöörduda arsti poole.
- Juhusliku allaneelamise korral anda joomiseks vett või soolveti ja kutsuda esile oksendamine. Pöörduda kohe arsti poole.

Säilitamine

- Mitte lasta külmuda, hoida jahedas, kuivas hästi ventileeritud kohas (< 30 °C). Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest. Kaitsta päikesevalguse eest.

Kõlblikkusaja lõpp

Kõlblikkusaja lõpp on trükitud pakendile.

Kõrvaldamine

- Tellige lahuste ja pudelite kõrvaldamine jäätmekäitlusettevõttelt või kõrvaldage need kohalike eeskirju järgides.

Ettevaatusabinõud

Hoiatus


Eespool olev piktogramm käib etanooli kohta.

- Tuleohtlik vedelik ja aur.

Spetsifikaadid

Toode	Tissue-Tek® Eosin Prisma (Plus) standardlahuse mahutile
Sisaldab	820 ml

Toimeaine eosiin, kuni < 0,2%

Märkus

- Värvimist võib mõjutada see, kui reagent näib olevat lahjenenud, selle fluorestsentsi tase on madal või kui esineb sadestumist. Selliste muutuste täheldamise korral asendada uue kotikesega.
- 2D-vöötkood (Tissue-Tek® Prisma vöötkood) kotikese etiketil on ette nähtud lahuse haldamiseks automatiseeritud vaatluspreparaadi värvimise süsteemiga Tissue-Tek Prisma® Plus, kasutades 2D-vöötkoodi lugurit (lisaseade).
- Ärge kahjustage kotikese etiketile trükitud 2D-vöötkoodi. Häguse või kahjustatud vöötkoodi skannimine pole võimalik.
- Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleb teatada seadme tootjale ja oma pädevale asutusele.

IVD In vitro
diagnostikameditsiiniseade

30°C Temperatuuri ülempiir

CE CE-märgis

Örn, käsitseda ettevaatlikult

Hoida eemal
päikesevalgusest

Lugeda kasutusjuhendit või
elektroonilist kasutusjuhendit

Külastage meie veebisaiti

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

pidev innovatsioon patoloogias

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödisstrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Toodetud Jaapanis

