

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Instrucciones de uso

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips es un vidrio diseñado para usarlo únicamente con Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Uso previsto

Este producto se utiliza para cubrir portaobjetos de vidrio que contengan una sección adherida de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina (FFPE) o muestras citopatológicas. Su uso permite protegerlas de la fuerza mecánica o la exposición ambiental y observar el portaobjetos bajo el microscopio óptico para el examen microscópico. Este producto se utiliza junto con un medio de montaje que se deposita sobre la muestra para la fijación del cubreobjetos de vidrio al portaobjetos.

Usuarios a quien va dirigido

Toda persona que trabaje en el ámbito de la patología, la anatomía o la citología clínica con conocimientos básicos en sus respectivos campos (por ejemplo, patólogo, técnico de laboratorio médico) y se encargue de la preparación de portaobjetos de microscopio.

Materiales necesarios no suministrados

Portaobjetos para microscopio, medio de montaje

Instrucciones de uso

1. Retire la cubierta de plástico del soporte.
2. Retire la espuma.
3. Coloque el soporte en la posición de carga de cubreobjetos de vidrio.
4. Deslice la manija hasta la ranura adecuada.
5. Coloque el soporte en posición horizontal sobre la posición de carga de cubreobjetos de vidrio.

Precauciones de uso

- Utilice guantes para evitar cortarse con los bordes afilados del vidrio.
- En caso de que se produzca polvo o desprendimiento por una rotura o al desechar el producto, utilice una máscara de protección antipolvo (certificada por las autoridades pertinentes) para evitar su inhalación, así como gafas y guantes de protección.
- Evite tocar los cubreobjetos de vidrio con las manos húmedas, ya que estos podrían quedar pegados.
- Evite el contacto del portaobjetos con disolventes orgánicos, ya que estos podrían descomponer el portaobjetos.
- Para la instalación de los cubreobjetos de vidrio, consulte el manual de funcionamiento del dispositivo que va a utilizar con este producto.

Medidas de seguridad

- Penetración en los ojos: si entra polvo en los ojos, lávelos inmediatamente con agua del grifo y consulte a un médico.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Fabricado en Japón	



Producto sanitario para diagnóstico in vitro



Marca CE



Mantener alejado de la luz solar



Mantener seco



40°C Límites de temperatura



No reutilizar



Frágil, manipular con cuidado



Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones electrónicas de uso

Visite nuestro sitio web

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

- Adherencia a la piel: limpie con cuidado sin dañar la piel. Consulte a un médico si se produce alguna herida o sarpullido.
- Ingestión: retire cualquier residuo de la boca y acuda lo antes posible a un médico.
- Inhalación: si inhala polvo, realice gárgaras. Si continúa teniendo picores, dolor o molestias en la nariz o la garganta, consulte al médico.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

- Evite el contacto con la luz directa del sol, así como lugares con una elevada temperatura o humedad. Almacene el producto en interiores, en un lugar con suficiente ventilación natural.
- Cuando haya retirado del dispositivo el conjunto de soporte, guárdelo con su cubierta original.

Fecha de caducidad

La fecha de caducidad está impresa en el paquete.

Desecho

Eliminar a través de una empresa de tratamiento de residuos autorizada o de acuerdo con la normativa local aplicable.

Precauciones

El siguiente pictograma hace referencia a polvo de sílice producido por polvo de vidrio.



- Puede producir cáncer.
- Podrían producirse lesiones en el sistema respiratorio y el sistema renal si se inhala polvo con partículas durante largos períodos y en grandes cantidades.

Especificaciones

Cantidad: 200/soporte; 5/caja

Tamaño: 24 x 50 mm

Espesor: 0,13 a 0,17 mm

Nota

Si se produce algún incidente grave en relación con el producto, deberá notificarse al fabricante, al representante autorizado y a la autoridad competente.