

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Инструкции за използване

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film е фолио, предназначено да се използва само със Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Предназначение

Този продукт се използва за покриване на пробата на микроскопско предметно стъкло, да служи като физическа бариера от механична сила или излагане на въздействията на околната среда. Пробата, която ще се предпазва, може да бъде фиксирана във формалин и вградена в парафин (FFPE) участък, замразен участък или цитологична проба на микроскопско предметно стъкло. Лепилото се активира от активиращ реагент и когато лепилото изсъхне, покритите предметни стъкла могат да се използват за микроскопска оценка, сканиране или транспорт. Този продукт може да се премахва при нужда. Това е изделие за еднократна употреба и се използва за покриване на предметни стъкла с фолио.

Предвиден потребител

Този продукт е предназначен за употреба от обучени професионалисти в клиничната патология, анатомия или цитология, които са подготвени за използването на Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Начин на употреба

- Този продукт използва само ксилен като активиращ реагент.
- Този продукт може да се използва както на хидрофилни, така и на хидрофобни предметни стъкла.
- Оставете фолиото да се аклиматизира напълно към средата, в която ще се използва. Опаковката на фолиото трябва да е отворена, за да може фолиото да се аклиматизира за 24 часа преди употреба.
- Изхвърлете първите 80 cm от фолиото преди монтиране на нова ролка на устройството за покриване на предметни стъкла. Това ще осигури отстраняване на повредения участък, който оригинално е осигурен с лепяща лента.
- При повторно монтиране отстранете 3 до 6 mm от фолиото с помощта на режещото острие на инструмента.
- В края на работния ден или когато приключвате работа за деня, отстранявайте ролката от устройството за покриване на предметни стъкла, навивайте фолиото на ролката и го съхранявайте в найлонов плик, за да предотвратите приемането на извивката на ролката(ите) от фолиото.
- За монтиране на фолиото и повече подробности за употребата вижте ръководството за експлоатация на устройството, което ще се използва в комбинация с този продукт.

Бележка: в последните стъпки на оцветяването на пробата трябва винаги да се използва чист ксилен с реактивно качество при подготвянето на предметните стъкла за покриване.

Премахване на Coverslipping Film

Това фолио може да се премахва според следната процедура.

1. Потопете покритото с фолио предметно стъкло в минимум 50 ml ацетон за 6 минути. Когато обработвате няколко предметни стъкла наведнъж, оставайте известно разстояние между тях, за да не влиза в контакт отлепеното фолио на предметните стъкла.
2. След като предметните стъкла са напоени в ацетон за 6 минути, отстранете фолиото с помощта на пинсети.
3. Потопете и извадете предметните стъкла в 2 смени на ксилен (всяка по 50 ml), за да премахнете останалото фолио и лепило, докато бялото замъгляване на предметните стъкла изчезне. 50 ml ксилен са достатъчни за до 10 покрити с фолио предметни стъкла.

Бележка: предметните стъкла могат да се покриват повторно с ново фолио.

Предпазни мерки за употреба

- Наблюдавайте средата за работа и съхранение, понеже влошаването на качеството на фолиото може да доведе до грешки в покриването.
- Не използвайте фолио, когато не е съхранявано според спецификациите.
- Уверете се, че повърхността на предметното стъкло е изсушена преди употреба в цифров скенер за предметни стъкла.
- Проверявайте дебелината на предметните стъкла, за да се намали и/или ограничи нейното вариране. Възможно е дебелината на цитологичните проби да варира в широки граници. Може да се появят мехурчета и да затруднят диагностицирането на пробите след съхранение.

Мерки за безопасност

Носете ръкавици и маска, за да предотвратите излагане на активиращ реагент (ксилен).

Среда за работа и съхранение

Работа и съхранение:

10°C до 30°C (50°F до 86°F), влажност 30% до 70%.

Съхранение на предметно стъкло с покритие от фолио (препоръка):

20°C до 25°C (68°F до 77°F), влажност по-малко от 50%.

Срок на годност

Срокът на годност е отпечатан на предната страна на 1 кутия и на горната страна на 1 опаковка ролка.

Изхвърляне

Дайте за изхвърляне на одобрена фирма за отпадъци или изхвърлете в съответствие с приложимите местни разпоредби.

Бележка

При възникване на някакви сериозни във връзка с устройството те трябва да бъдат съобщени на производителя, упълномощен представител и на Вашия компетентен орган.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Произведено в Япония



Медицинско изделие за диагностика инвитро



Направете справка в инструкциите за използване



Чупливо, боравете внимателно



CE маркировка




Не използвайте повторно



Пазете далеч от слънчева светлина



Пазете сухо

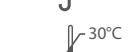

Температурна граница



Граница за влажност

Моля, посетете нашия уебсайт

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

