

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Brugsanvisning

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film er en film, som udelukkende er designet til brug med Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Tilsigtet formål

Dette produkt bruges som dækglas på et objektglas for at fungere som fysisk barriere mod mekaniske kræfter eller miljøpåvirkning. Den prøve, der skal beskyttes, kan være en formalinfikseret og paraffinindlejret (FFPE) sektion, frossen sektion eller en cytologiprøve på et objektglas. Klæbemidlet aktiveres af en aktuator, og når klæbemidlet er tørret, kan objektglassene med dækglas bruges til mikroskopisk evaluering, scanning eller transport. Produktet kan fjernes, hvis det ønskes. Det er et engangsprodukt og bruges i film-coverslipperen.

Tilsigtet bruger

Dette produkt skal bruges af uddannede fagpersoner inden for klinisk patologi, anatomi eller cytologi, som er uddannet i brug af Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Anvendelse

- Dette produkt bruger xylen som aktuator.
- Dette produkt kan bruges på både hydrofile og hydrofobe objektglas.
- Lad filmen akklimatisere sig fuldstændigt til det miljø, hvor den skal bruges. Filmpakken skal åbnes, så filmen kan akklimatisere sig i 24 timer før brug.
- Kassér de første 80 cm film, før der installeres en ny rulle i coverslipperen. Dette vil sikre, at det urene område, der oprindeligt var fastgjort med klæbende tape, fjernes.
- Når den skal genindsættes, skal du fjerne 3 til 6 mm af filmen ved hjælp af instrumentets knivskærer.
- Ved slutningen af arbejdsdagen, eller når du er færdig med dagens arbejde, fjern rullen fra coverslipperen, spole filmen tilbage på rullen og opbevare den i plastikposen for at forhindre, at filmen tager krumningen fra rullen/rullerne.
- For filminstallation og flere detaljer om brug henvises der til betjeningsvejledningen for den enhed, der skal bruges sammen med dette produkt.

Bemærk: I de sidste trin af prøvefarvning skal der altid bruges ren xylen af reagenskvalitet til at klargøre objektglas til coverslipping.

Fjernelse af Coverslipping Film

Denne film kan fjernes i henhold til følgende procedure.

1. Dyp et objektglas med dækglas på i minimum 50 ml acetone i 6 minutter. Når du behandler flere dækglas på én gang, skal du efterlade noget plads imellem dem, så de afpillede filmstykker ikke kommer i kontakt med hinanden.
2. Når dækglassene har ligget i blød i acetone i 6 minutter, fjernes filmen med en pincet.
3. Dyp dækglassene op og ned i 2 forskellige omgange xylen (50 ml hver) for at fjerne resterende film og klæbemiddel, indtil den hvide uklarhed på objektglasset forsvinder. 50 ml xylen er nok til op til 10 objektglas med dækglas.

Bemærk: Dækglasset/dækglassene kan få påført ny dækglasfilm.

Forholdsregler for brug

- Overhold betingelserne for betjenings- og opbevaringsmiljøet, da nedbrydning af filmen kan medføre coverslippingfejl.
- Brug ikke film, hvis den har været opbevaret uden for specifikationerne.
- Kontrollér, om objektglassets overflade er tørret ud, før du bruger det i en digital objektglasscanner.
- Undersøg objektglassene for at reducere og/eller begrænse variationer i tykkelse. Cytologiprøver kan medføre prøvetykkelser, der kan variere i meget høj grad. Bobler kan opstå og gøre prøver vanskelige at diagnosticere efter opbevaring.

Sikkerhedsforanstaltninger

Brug handsker og maske for at forhindre eksponering fra aktivatoren (xylen).

Betjenings- og opbevaringsmiljø

Betjening og opbevaring:

10°C til 30°C (50°F til 86°F), fugtighed på 30% til 70%.

Opbevaring af objektglas med dækglasfilm (anbefaling):

20°C til 25°C (68°F til 77°F), mindre end fugtighed på 50%.

Udløbsdato

Udløbsdatoen er trykt på forsiden af 1 æske og på toppen af 1 rullepakke.

Bortskaffelse

Bortskaf produktet hos en godkendt affaldsvirksomhed eller i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Bemærk

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten, den autoriserede repræsentant og den kompetente myndighed.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Fremstillet i Japan	



In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr



Se brugsanvisningen



Skrobelig, håndteres forsigtigt



CE-mærke



Må ikke genbruges



Holdes væk fra sollys



Holdes tør



Temperaturbegrænsning



Fugtighedsbegrænsning

Besøg vores hjemmeside

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

